

簡単組立式

お出かけ用簡易トイレ

オ・サンポレット

Q・SANPOLET

●要介護の方の外出時に

●災害時の緊急トイレに

●アウトドアでのトイレに

●水や電気の無い作業場等に



組立わずか1分

便袋仕様で清潔

サニタクリーンワンズケアとの組合わせて、
いつも清潔でキレイなトイレ環境。
しかも簡単に組み立てられ、軽くて丈夫!

イザという時スグ使えます!

持ち運びに便利
コンパクト設計

コンパクトに折り畳んで持ち運べますので、
お出かけの時や、お部屋での収納にも
大変便利!



専用キャリーケース

専用便袋
サニタクリーン ワンズケア

※別売です

お試しワンズケア(同梱)

本商品に付属していますので、
すぐにお使いいただけます。



2枚入

仕様

セット内容：オ・サンポレット本体、お試しワンズケア 2枚
組立サイズ：W410×D410×H400mm
梱包サイズ：W430×D85×H430mm
素材：ポリプロピレン、低発泡ポリシート
重量：約 1.7kg (梱包重量：約 2kg)
耐荷重：約 100kg

日本製

※ご在宅でのポータブルトイレとしてもお使い戴けます。




20枚パック

オ・サンポレットの組立て方 ※指を挟まないようにご注意ください。

- ①マジックテープを外したら、胴体部分を図のように山型の羽根のある方を上にして置きます。
- ②内側から矢印方向に上げて形を作ります。
- ③山型の羽根部分を内側に折り込み、交互にはめ合わせます。
- ④天地をひっくり返し、ゆるいところが無いか確認します。
- ⑤補強板2枚を、図のように本体の溝の上から差し込みます。この時、斜線部分が本体の外側になります。
- ⑥マジックテープ部分をしっかり貼り合わせます。
- ⑦蓋をかぶせて完成です。

便袋のセット方法

- ①便座を上方に上げます。
- ②便座の内側から便袋を外側に通します。

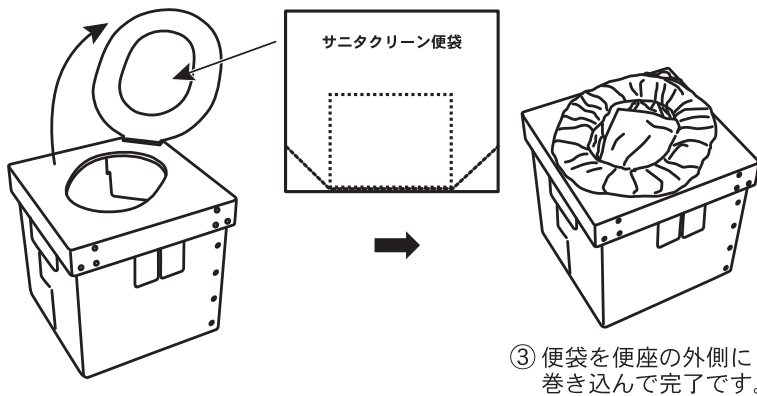

ご注意

サニタクリーンワンズケア以外の袋等をご使用されますと、サイズが合わないため、漏れ、破け、汚損等の不具合が発生する可能性がございますので、ご使用をお控えくださいますようお願い致します。

警告

- ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。
- 簡易トイレ以外の目的には絶対に使用しないでください。
- 使用前にしっかり組立てられているかご確認ください。

注意

- 組立時、おりたたみ時は指などを挟まないようにご注意ください。
- 便座の上に物を載せたり、踏み台代わりにしないでください。
- 使用時は傾斜のない平坦で水平な場所に設置してください。
- 本製品は耐荷重 100kg を想定して設計しておりますが、特に体重の重い方がご使用される場合はご相談ください。
- 使用中は異常や変形が無い点検し、万が一異常が発見された場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本商品を改造しないでください。
- 保管にあたっては高温・多湿を避けてください。変質、変形、破損の原因になります。
- サニタクリーンワンズケア以外をご使用されての不具合は、保証対象外となりますのでご注意ください。

製造元

株式会社 総合サービス

お客様相談室：0120-980-329

受付時間：土・日・祝を除く10:00～17:00

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-6-19
<http://www.sservice.co.jp/products/care.html>